


抗がん剤使用時の注意事項
 抗がん剤の散薬を分包したあとは、**重曹（乳糖）**で**2回以上の洗い分包**をおこなってから、薬品経路の清掃をおこなってください。
 清掃時は、必ず手袋とマスクを着用してください。
 また、清掃で使用したウェスはチャック付きのポリ袋に入れて廃棄してください。

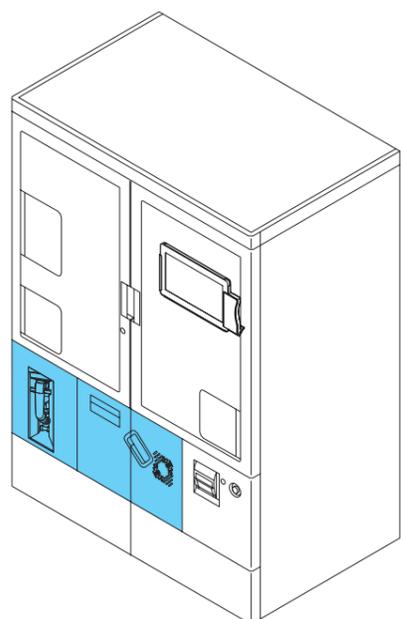


冷却ファン用フィルター

掃除機で清掃する

散薬ホッパー

水拭きしたあと乾拭きする

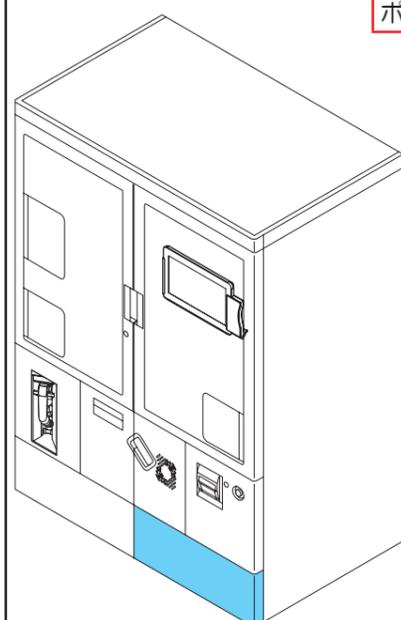


掃除機パック

新品に交換する
 ※パック内にゴミが半分以上、または掃除機の吸引力が低下した場合

吹き上げ防止金具

アルコールを含んだ柔らかい布で拭き取る

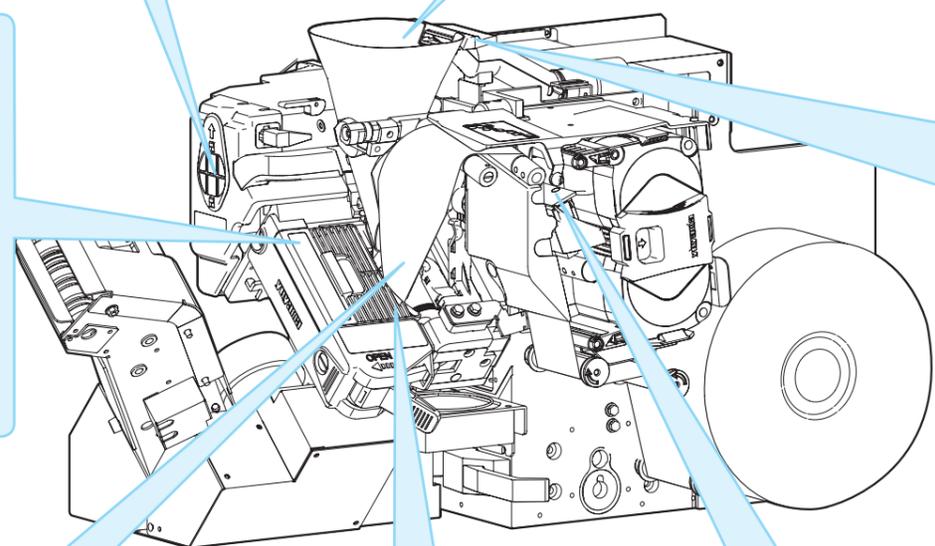

ホッパーダクト

掃除機で清掃する

紙ガイド


水拭きしたあと乾拭きする

ヒーターローラー

付属のブラシで清掃する

プリンタヘッド

プリンタヘッドクリーナー
 付属のプリンタヘッドクリーナーでアルコール拭きをする

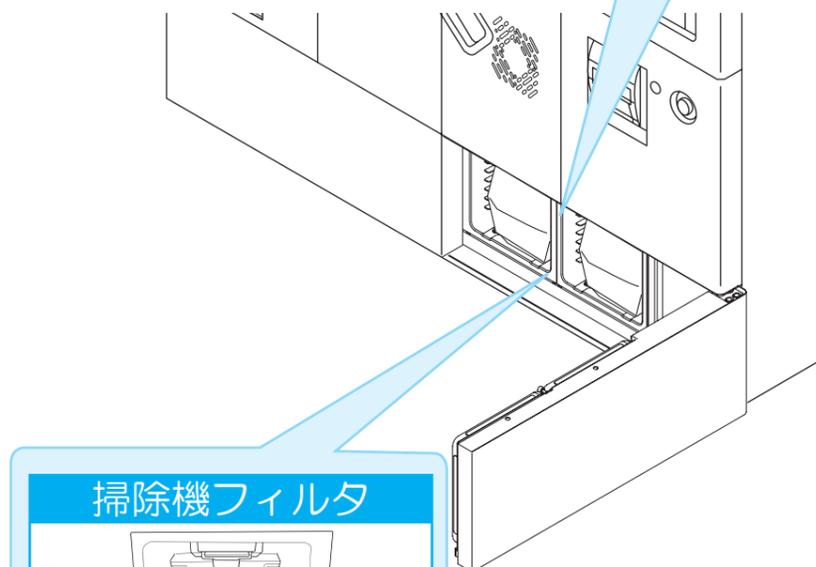


掃除機フィルタ


水洗いする

抗がん剤使用時の注意事項

抗がん剤の散薬を分包したあとは、**重曹（乳糖）で2回以上の洗い分包**をおこなってから、薬品経路の清掃をおこなってください。
清掃時は、必ず手袋とマスクを着用してください。
また、清掃で使用したウェスはチャック付きのポリ袋に入れて廃棄してください。

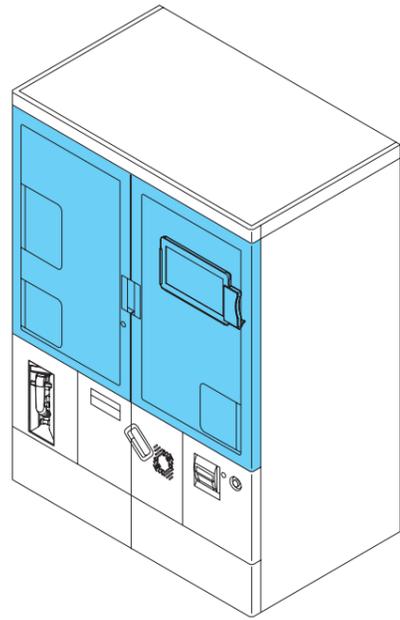

円盤カバー

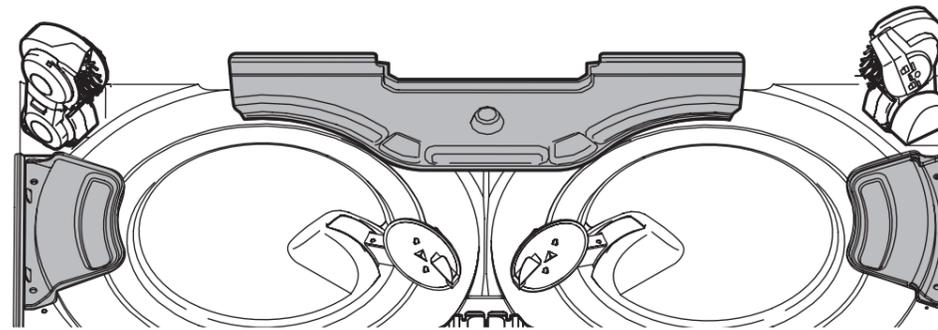


※分解した絵




掃除機で清掃後、水拭き・乾拭きする


ターボブラシユニット

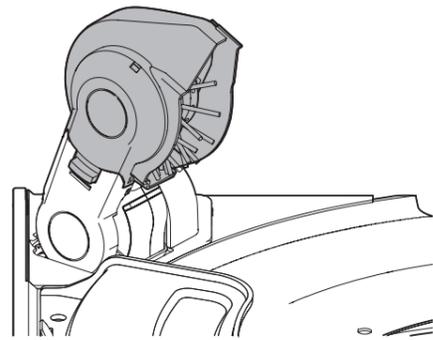


※分解した絵

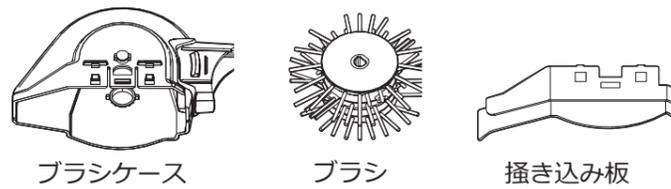

水洗い後、乾拭きをして十分に乾燥させる

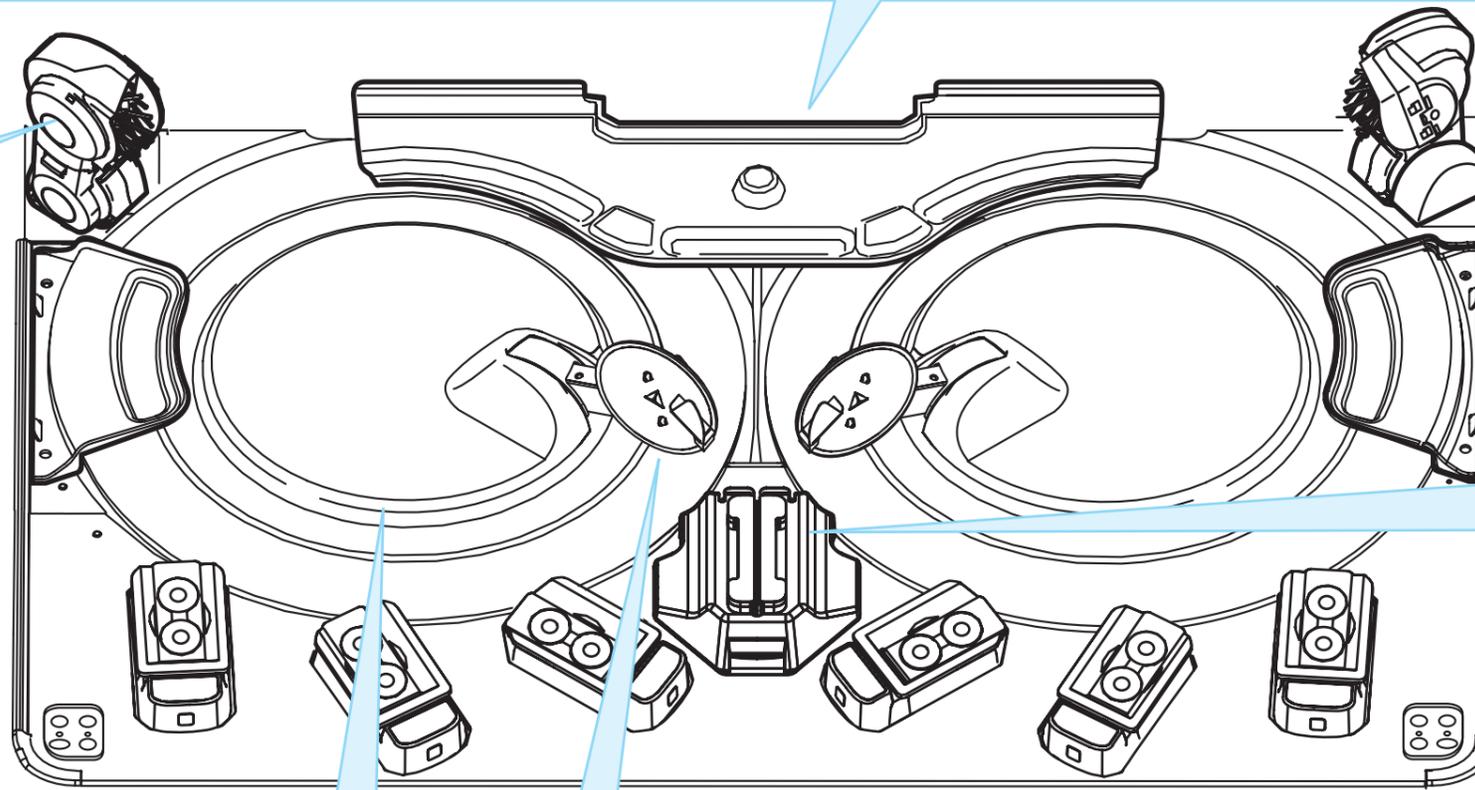


R円盤

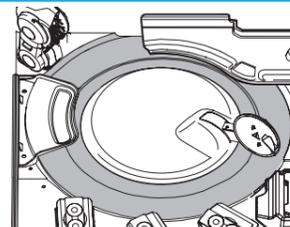


掃除機で清掃後、水拭き・乾拭きする

スクレープゴム

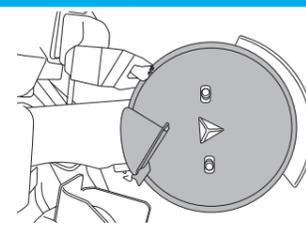

水拭き・乾拭きする

清掃フタ

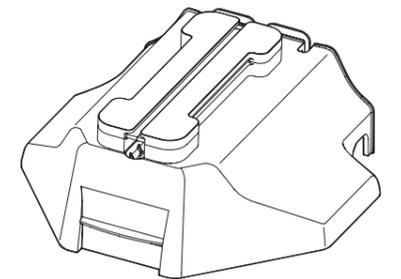

※分解した絵



掃除機で清掃後、水拭き・乾拭きする