

お掃除チェックリスト

charty-IV

※水拭き、水洗いをした場合は、完全に乾いたことを確認してからご使用ください。

実施日	部品名	ページ	清掃方法	交換及び修理時期
毎日	錠剤セット板	130	掃除機で清掃する 汚れがひどいときは柔らかい布で水拭き後、乾いた柔らかい布で水分を拭き取る	薬品のこびりつき、または破損、変形したとき
	錠剤分割器	130		
	錠剤ホッパー	130		
	錠剤スライド板	130		
	散薬ホッパー	150		
	紙ガイド	156		
	散薬分割器	137	掃除機で清掃する 汚れがひどいときは付属のブラシで清掃する	破損、変形したとき
	Vマス	-		
	Vマス仕切り板・マグネット板	135	掃除機で清掃する 汚れがひどいときは柔らかい布で水拭き後、乾いた柔らかい布で水分を拭き取る	
	押し出しケース	143		
	ヒーターローラー	156	付属のブラシで清掃する	
	吹き上げ防止金具	156	アルコールを含んだ柔らかい布で拭き取る	

※ページは取扱説明書の掲載ページです。

※実施日は目安であり、使用状況により変化します。

※破損、変形したときや清掃後の分包装機に問題がある場合は、お買い上げの販売店までご連絡ください。

実施日	部品名	ページ	清掃方法	交換及び修理時期
1週間	掃除機フィルタ	116	水洗いする	汚れがひどいとき
	掃除機紙パック	116	新しい紙パックと交換する	掃除機紙パック内にゴミが半分以上溜まっている、または掃除機の吸引力が低下したとき
	錠剤カセット (オプション)	71	掃除機で清掃する	破損したとき
	モーターベース (オプション)	167	柔らかい布で水拭き後、乾いた柔らかい布で水分を拭き取る	
	VC (オプション)	181	掃除機で清掃する 汚れがひどいとき、または薬品交換時は分解清掃をおこなう ※分解清掃の実施日は1ヶ月	
	大ホッパー (オプション)	169	掃除機で清掃する 汚れがひどいときは柔らかい布で水拭き後、乾いた柔らかい布で水分を拭き取る	
	プリンタヘッド	173	付属のプリンタヘッドクリーナーでアルコール拭きする	清掃しても印字擦れなどが直らないとき

2週間	散薬ホッパー用冷却ファンフィルタ	128	掃除機で清掃する	劣化が見られたとき
-----	------------------	-----	----------	-----------